

HYGIENISCH UND WIRTSCHAFTLICH
Die Papier- und Vliesprodukte von ELOS



www.elos.de

COVID-19 ANTIGEN LAIENTEST

Gewissheit nach rund 15 Minuten

Das **COVID-19 Antigen Laientestkit (Abstrich)** ist ein Lateral-Flow-Immunoassay zum qualitativen Nachweis von Nucleocapsid-Protein-Antigen in direkten Nasenabstrichproben von Personen.

Das BfArM hat für diesen Artikel eine Sonderzulassung nach §11 Absatz 1 Medizinproduktegesetz (MPG) von Antigen-Tests zur Eigenanwendung durch Laien (Selbsttests) zum Nachweis von SARS-CoV-2 erteilt. Damit kann dieser Selbsttest auch durch Laien angewandt werden. **Die Registrierungsnummer ist 5640-S-123/21.**



Safecare COVID-19 Antigen-Laientest, 1er Pack

Art.-Nr.: 970082 · 10 Stück/Box · 250 Stück/Karton

Safecare COVID-19 Antigen-Laientest, 5er Pack


Art.-Nr.: 970075 · 5 Stück/Box · 1.000 Stück/Karton

COVID-19 ANTIGEN LAIENTEST

- COVID-19 Laientest für zu Hause
- Verwendungszweck: Test von SARS-CoV-2-Antigen
- Probenentnahme: Nasenabstrichtupfer
- Testergebniszeit: 10 – 15 Minuten
- Gesamtgenauigkeit: 98,50 %
- Lagerungshinweise: 4 – 30 °C
- Mindesthaltbarkeit: 24 Monate nach Herstellungsdatum

COVID-19 ANTIGEN LAIENTEST

Probenvorbereitung und Testverfahren

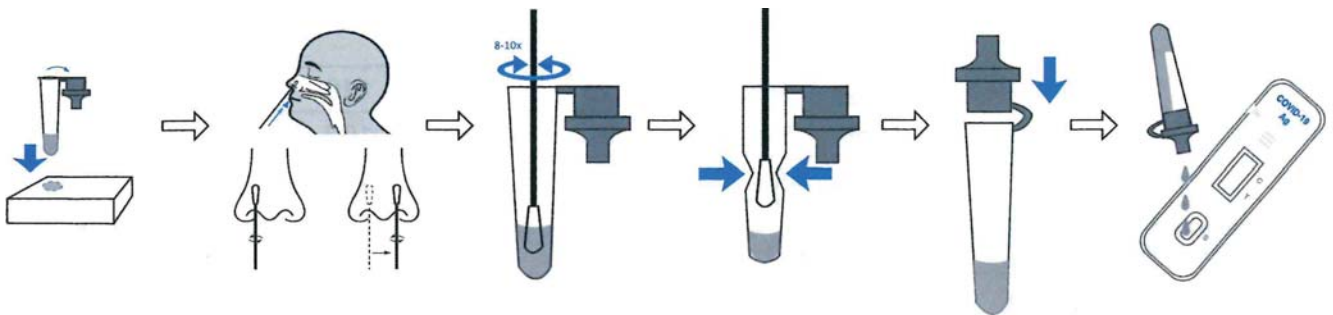

Den Dichtungsfilm abreißen und das Röhrchen in das Loch der Box einführen

Den Tupfer bis zu 2,5 cm tief in die Nase einführen und 5 Mal in jedem Nasenloch drehen


Den Tupfer 8 bis 10 Mal drehen

Den Tupfer im Röhrchen zusammendrücken und so viel Flüssigkeit wie möglich ausdrücken

Den Tropfaufsatz aufsetzen

3 Tropfen in das Probenfeld (S) setzen

Interpretation der Testergebnisse

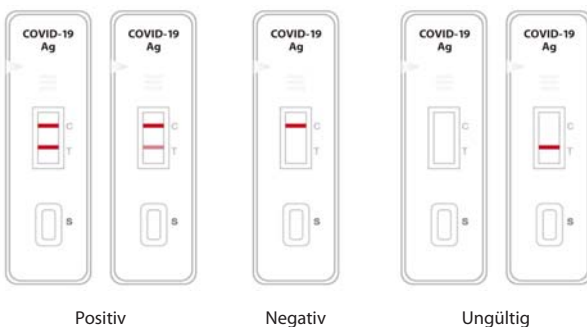

Positiv

Negativ

Ungültig

